

# Texttelefonen

## Så här ringer du från texttelefon till texttelefon

(anvisningarna nedan gäller för texttelefon Diatext III, med en annan typ av texttelefon ser bruksanvisningen annorlunda ut)

1. Slå på bildskärmens nätströmbrytare.
2. Tryck på LINJE -knappen (den röda lampan tänds).
3. Vänta på kopplingston (nottecken syns i teckenfönstret).
4. Lyft telefonluren.
5. Slå telefonnumret.
6. Vänta ett par sekunder, lägg sedan på telefonluren.
7. Vänta på svar (nottecken visar signaler).
8. När texttelefonen svarar tänds trafiklampan (den gröna knappen) och samtalet kan börja.  
Den text du skriver kommer upp på mottagarens bildskärm.  
När du vill ha svar avslutar du med KOM eller \* så att den du skriver till vet att det är hans eller hennes tur. När du vill avsluta samtalet skriver du KLSL (Klart Slut).  
Vänta med att avsluta samtalet till att den du pratar med också sagt KLSL (Klart Slut).
9. När samtalet är slut, tryck på LINJE-knappen (den röda lampan, linjeknappen slocknar).
10. Slå av bildskärmens nätströmbrytare.



## Så här svarar du

1. Lampan blinkar när det ringer.
2. Slå på bildskärmens nätströmbrytare.
3. Tryck på LINJE-knappen (den röda lampan tänds).
4. När trafiklampan tänds kan samtalet börja.  
Börja med att tala om ditt namn eller telefonnummer. Avsluta med \* eller KOM.
5. När samtalet är slut, tryck på LINJE-knappen.
6. Slå från bildskärmens nätströmbrytare.



## Samtal mellan texttelefon och vanlig telefon

Samtalen förmedlas av Telia texttelefonförmedling.  
Från texttelefon till vanlig telefon ring 90 160  
Från vanlig telefon till texttelefon ring 90 165

